


GUÍA RÁPIDA COLOCACIÓN HOLTER AFT-1000

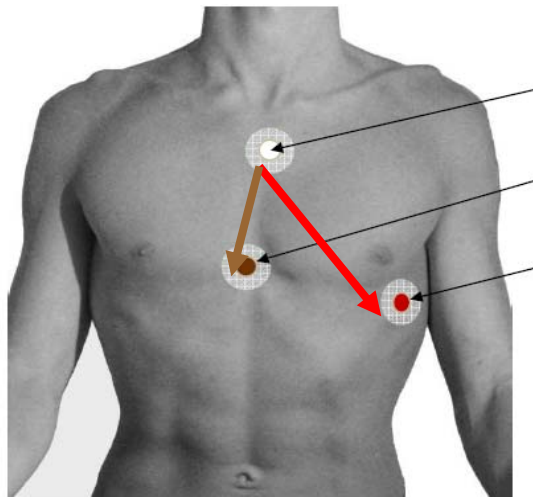


Blanco (referencia)

Marrón/Negro (Canal B)


Rojo (Canal A)

Cerrar la tapa de la pila AAA para poner en marcha.
Posición I

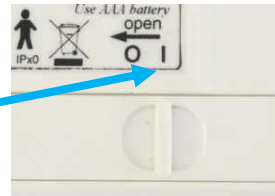


Tiempo registrado/
Tiempo disponible en h


Temperatura y porcentaje de la pila

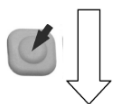

Pulsar botón gris

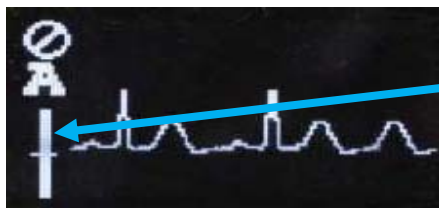

Verificación de la señal CANAL A
Comprobar barra impedancia
correcta (debajo letra A)

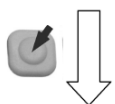

Pulsar botón gris




Verificación de la señal CANAL B
Comprobar barra impedancia
correcta (debajo letra B)



Pulsar botón gris



Inicio de la cuenta atrás.
Canales mal conectados (!)

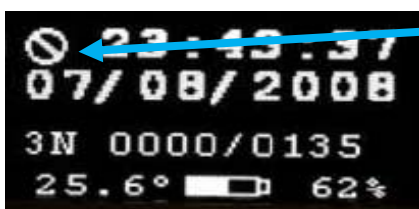

Rueda girando al grabar.
Señal acústica confirma inicio.
Se apaga la pantalla.