

Serie AFT Grabadora Holter



Contacto:

Registro estándar

Registro avanzado
(ST, QT, etc...)



2 canales ECG

3 canales ECG

NORMAL

OPTIMIZADO

Cable 2 canales 3 electrodos
(2L3-250)





Cable 2 canales 5 electrodos 250Hz
(2L5-250)

NORMAL

OPTIMIZADO

Cable 3 canales 4 electrodos
(3L4-250)

Cable 3 canales 7 electrodos 250Hz
(3L7-250)

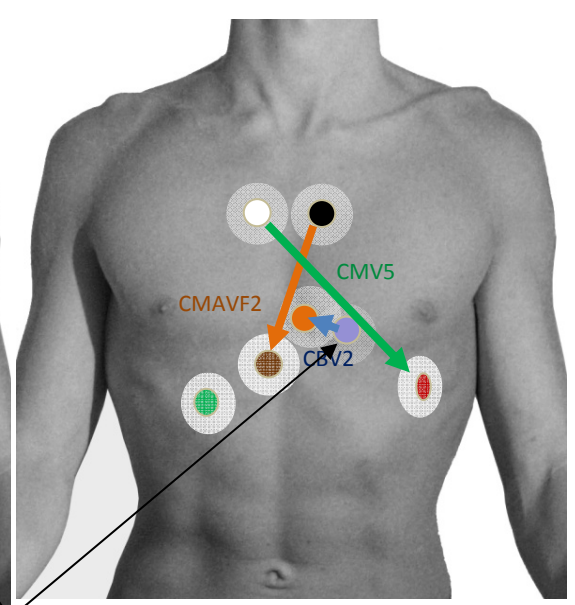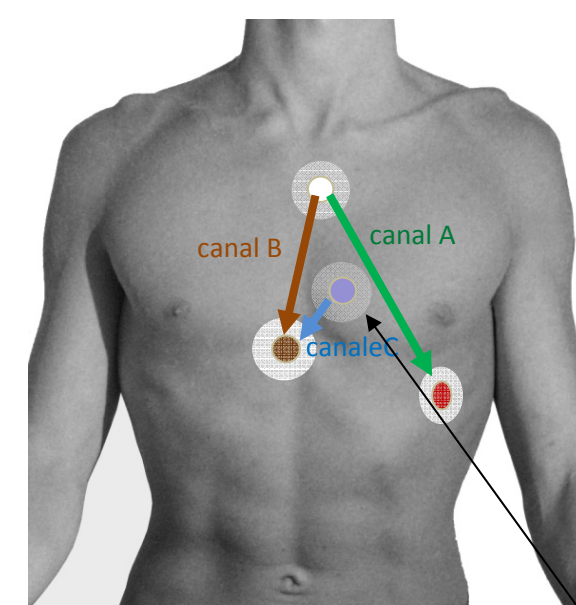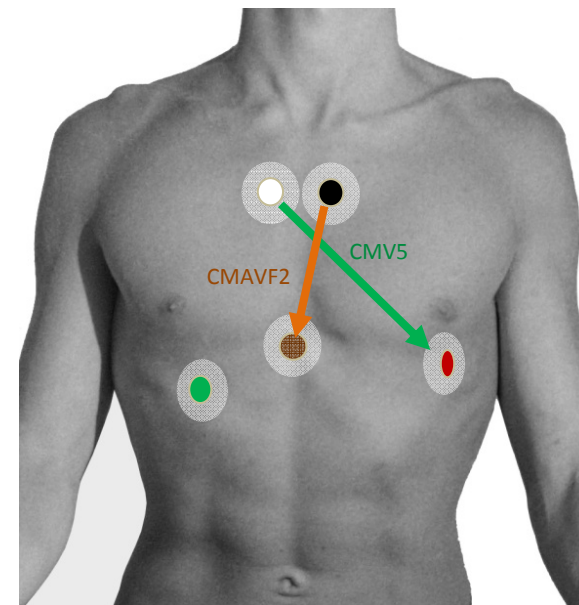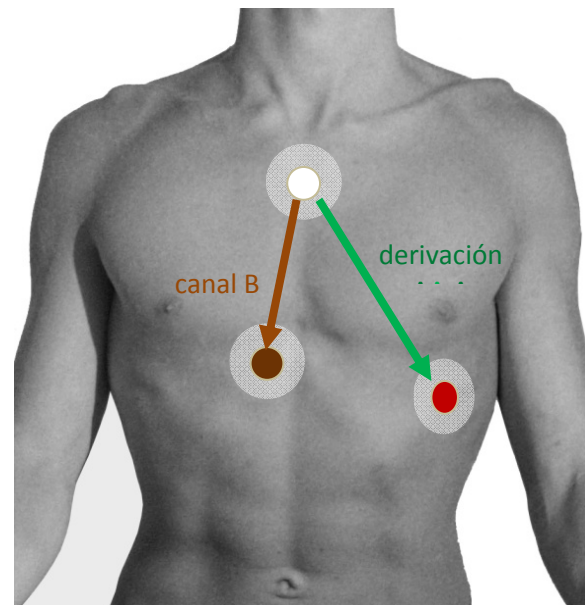


(Electrodo azul colocado en la espalda)

IMPORTANTE!

- Elige electrodos de buena calidad para una larga duración de vida.



- Raspar ligeramente la piel antes de colocar los electrodos para reducir las impedancias

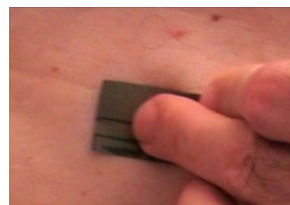

Para marcapasos o análisis avanzado: utilizar el cable 2 canales 5 cables 1000Hz (2L5-1000, mismo diseño que el 2L5-250Hz) o el cable 3 canales 7 cables 1000Hz (3L7-1000, mismo diseño que el 3L7-250)

Las posiciones de los electrodos se pueden adaptar al paciente. Por ejemplo para el registro normal de 2 derivaciones, el electrodo blanco puede ser colocado bajo la clavícula derecha y el marrón debajo de la clavícula izquierda. Esto le da un equivalente al D1 para la derivación B y una buena relación señal / ruido.

TIEMPO (días) de GRABACIÓN disponible:

Cable ECG :	2 canales - 250Hz	2 canales-1000Hz	3 canales - 250Hz	3 canales - 1000Hz
AFT1000-01-A	10 días	2 días	6 días	1,6 días.
AFT1000-01-B	22 días	5 días	14 días	3,6 días.

Una señal de mejor calidad facilita el análisis, permite ahorrar tiempo y aumenta la fiabilidad del examen.

REFERENCIAS PRODUCTOS

Grabadoras:


250/1000Hz 10 días: AFT1000-01-A
250/1000Hz 22 días: AFT1000-01-B

Cables ECG:

- 2 canales normal: RFT00 2L3-250
- 3 canales normal: RFT00 3L4-250
- 2 canales optimizado: RFT00 2L5-250
- 3 canales optimizado: RFT00 3L7-250
- 2 canales H.Q.: RFT00 2L5-1000
- 3 canales H.Q.: RFT00 3L7-1000
- 2 canales+Respiración: RXT00 2L3-250


Bolsitas x10: PCT01_010-A
Bolsitas eco x100 PCT02-100-A
Cordón para el cuello x10 PCT05-010-A

INSTALACION

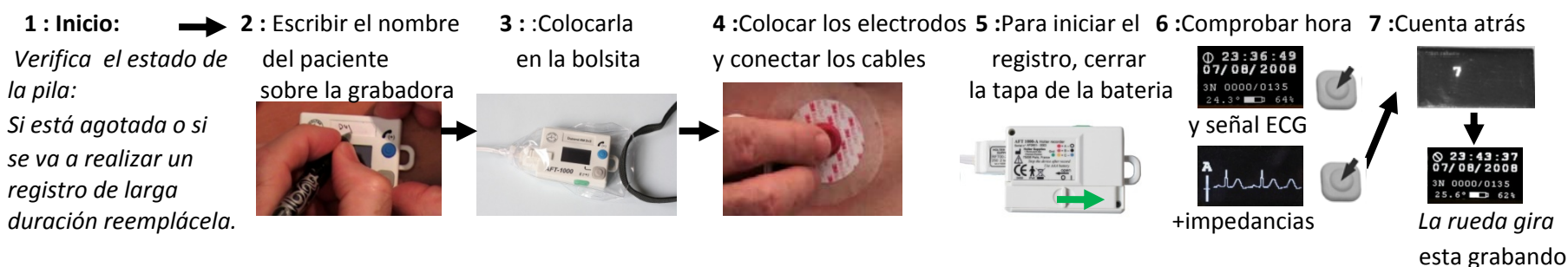

FINALIZAR

Para detener la grabadora abrir la tapa de la batería

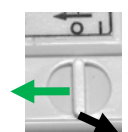

Batería OK?

Transferencia al PC

Este es un resumen del manual. Por favor, lea el manual para obtener más detalles.